


# 안티포그 시스템 : Defogger 사용설명서

사용 전에 본 사용설명서 전체를 숙지한다.

## [구성품]

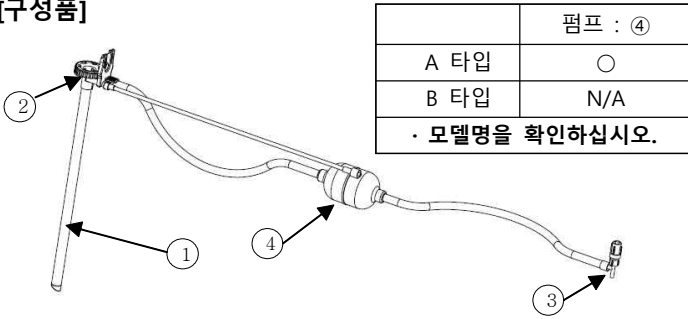

## [Defogger 설명]

Defogger (TS-505)는 일회용범용내시경기구로 복강경 수술시 환자 체온과 장비의 온도차로 인한 습기 또는 수술시 생길수 있는 연기에 Laparoscope Lens 시야 확보가 안 되어 Laparoscope Lens에 습기를 제거 하는 시스템으로 고안되었습니다.

## [사용목적]

Defogger (TS-505) 일회용범용내시경기구는 복강경 수술시 laparoscope 시야확보에 사용을 목적으로 합니다.

## [경고 및 주의사항]

이 장치는 일회용으로 사용하도록 제작되었습니다. 재생 또는 재사용하지 마십시오. 재사용을 하면 환자가 부상을 당하거나 한 환자에게서 다른 환자에게로 전염병이 전염될 수 있습니다.

- Defogger을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 잘 읽고 이해해야 합니다.
- 이 장치를 개조하지 마십시오.
- 사용하기 전에 무균 포장 및 구성품을 모두 확인하십시오.
- 본 장치를 재사용하지 마십시오. 생물학적 물질 및 이물질을 철저히 세척하기는 불가능합니다. 본 장치를 재사용하는 경우, 환자에게 부작용이 발생할 수도 있습니다.
- 제품에 충격을 주지 마십시오.
- 이 장치에는 국제 안전 표준을 준수하는 장비를 사용해야 합니다.
- 본 장치를 닦으면서 잡아당기고 (또는) 비틀 경우, 손상을 초래할 수 있습니다.

## [사용 전 준비 사항]

- 제품 및 포장지의 손상여부, 규격, 유효기간을 확인한다.
- 보관중인 제품이 사용하기 위한 청결상태 및 멸균상태를 유지하는지 확인한다.
- 멸균복을 착용하지 않은 사람은 멸균된 기구에 닿지 않도록 한다.
- 사용 전에 포장 외관상 현저한 변형이나 이물질 부착 등의 여부를 확인하여야 한다.

## [사용설명서]

- Defogger을 포장에서 꺼내어 멸균 영역에 놓으십시오.
- Laparoscope을 Defogger의 ①스코프커버에 서서히 밀어 넣고 ②클렌프를 돌려 잠근다. 이때 손가락의 힘만으로 조인다.
- 이서프레이션 튜브와 트로카 사이에 Defogger에 있는 ③T-컨넥터를 연결 한다.
- ③T-컨넥터를 다시 트로카(Trocar) 밸브에 연결한다.
- Laparoscope와 Defogger가 조립된 상태로 트로카에 밀어 넣는다. 이때 강제로 힘을 주지 말고 천천히 밀어 넣는다.
- 스탭콕을 연다. 모니터링 장치에 시야를 확인 하고 Defogger을 작동 한다.

- 수술이 완료되면 트로카에서 Defogger을 분리 시킨 후 적절한 방법으로 폐기합니다.
- 본 제품의 사용이나 성능에 관한 질문이 있으면, 현지 대리점이나 제조업체에 문의 하십시오.

## [폐기]

- 해당 지역의 법 및 규정에 따라 사용한 Defogger는 별도의 용기에 넣어 안전하게 폐기 한다.


## [품질보증 및 제조물 책임법]

- 본 자료에 서술된 제품에 대해서는 제한된 구매보증 또는 특정 용도 적합성을 제외하고 명시적 또는 묵시적 보증은 없습니다. 어떤 경우에도 (주)더스탠드 나 계열 회사는 특정법으로 명시된 규정 외에 특이하거나 직·간접적, 우발적, 결과적 또는 기타 피해에 대해 책임이 없습니다. 상기한 사항 이외에 (주)더스탠드 나 계열 회사는 일회용으로 표시되거나 또는 해당 법에 의해 재사용이 금지된 경우에 제품을 재사용한데서 비롯된 특이하거나 직·간접적, 우발적, 결과적 또는 기타 피해에 대한 책임이 없습니다. 본 간행물을 비롯하여 (주)더스탠드 유인물에 나타나는 설명과 사양은 단지 안내용이며 제조 당시 제품을 일반적으로 서술하기 위한 것뿐이며 어떤 식으로든 명시된 제품에 대한 보증으로 제공되는 것이 아닙니다.

## [보관 및 사용 후 통제]

- 포장이 뜯어져 있으면 사용하지 않았더라도 사용하지 마십시오.
- 시술이 끝나면 모든 제품은 사용하지 않았더라도 사용하지 마십시오.
- 재사용, 재멸균 하지 마십시오.
- 실온에 보관하십시오.
- 유효기간은 별도 표기에 따릅니다.

## [심볼]

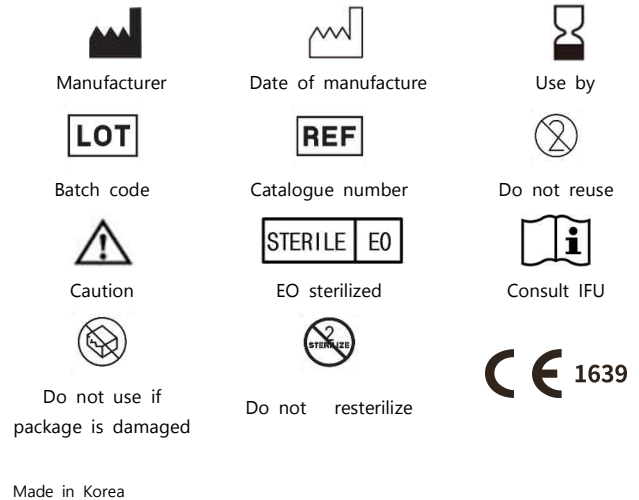

**(주)더스탠드**  
 [15880]  
 경기도 군포시 군포첨단산업2로 120, 1동(1층, 2층 일부, 3층), 2층  
 TEL : +82 2 838 5533  
 FAX : +82 2 838 5523  
 www.thestandard.co.kr

Defogger is a trademark of The Standard Co., Ltd